



# OMRON connect 設定ガイド

- ・ 歩数計測にオムロン活動量計(HJA-405T)をご利用の場合は、最初にOMRON connectのアカウント作成をお願いします。  
⇒製品に同封の「取扱説明書」「セットアップガイド」をご参照ください。
- ・ アカウント作成後、このガイドに沿ってOMRON connectとRenoBodyの連携設定をしてください。

# OMRON connectアプリ RenoBody連携設定手順 <iPhone>

最初にOMRON connectのアカウントを作成し、その後下記手順に沿ってOMRON connectとRenoBodyの連携設定をしてください。

### 1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重組成計を設定する



### 2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューより「連携アプリ・サービス」を開き、「ヘルスケア」横の歯車マークをタップ



### 3 OMRON connectとヘルスケアの連携①

「ヘルスケアデータを書き込み」をONにし、「全データ書き込み」をタップ



### 4 OMRON connectとヘルスケアの連携②

書き込み許可のダイアログで「OK」を選択  
※全データの書き込みを許可しなかった場合、ヘルスケアにデータが送られません



### 5 OMRON connectとヘルスケアの連携③

全データ書き込みが開始し、「書き込み完了」となったら「閉じる」をタップし、ホームに戻る



### 6 RenoBodyアプリの設定

RenoBodyアプリMENU>デバイス設定でiOSヘルスケアに変更し「設定する」をタップ



### 7 RenoBodyとiOSヘルスケアの連携

すべてのカテゴリを「ON」、またはデータ連携する項目を選択し、「許可」をタップ



### 8 設定完了

- iPhoneの **設定>プライバシー->モーションとフィットネス>ヘルスケアをOFF**にしてください。
- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリ、およびiOSヘルスケアアプリに歩数が同期されていることを確認後、RenoBodyを起動し歩数を更新してください。

# OMRON connectアプリ RenoBody連携設定手順 <Android>

最初にOMRON connectのアカウントを作成し、その後下記手順に沿ってOMRON connectとRenoBodyの連携設定をしてください。

## 1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重組成計を設定する



## 2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューを開き、「連携アプリ・サービス」を開く



## 3 OMRON connectとRenoBodyの連携①

「RenoBody(GooglePlay版)」をタップ



## 4 OMRON connectとRenoBodyの連携②

「同意する」をタップ



## 5 RenoBodyアプリの設定 歩数データ連携

RenoBodyアプリMENU> デバイス設定で「OMRON connect」を選択し、「設定する」をタップ



## 6 RenoBodyアプリの設定 体重データ連携

<体重データを連携する場合>

RenoBodyアプリMENU> デバイス設定画面を下にスクロールし、体重連携設定の「OMRON connect」をチェックし、「設定する」をタップ



## 7 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。  
※設定前に計測されたデータは反映しません。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリに歩数が同期されていることを確認後にRenoBodyを起動し、歩数を更新してください。